

SAFET™

T-PARÇA RESÜSİTATÖR



Her nefeste tutarlı PEEP ve PIP sağlayın.

SafeT™ T-Parçası Resüsitatörü, yenidoğan resüsitasyonu ve CPAP uygulamaları için güvenli bir çözümdür. Önceden ayarlanmış PIP ve PEEP basınçlarıyla birlikte sürekli oksijen akışı sunarak, klinisyenlerin bebeklerin resüsitasyonu sırasında gerekli ventilasyon desteğini güvenle sağlamasına olanak tanır. 10 kg / 22 lb altındaki prematüre bebeklerin ve yenidoğanların hassas akciğerleri için özel olarak tasarlanmıştır.

SafeT T-Parçası Değerlendirmeleri Mevcut
Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteniz (YYBÜ) ve
doğum/lohusa ekibiniz için bugün bir numune
veya ürün demonstrasyonu talep edin.

Yenidoğanların
hassas
akciğerlerine
güvenli
ventilasyon
uygulayın.

Tutarlı
ventilasyon
basıncı
sağlayın.



**Kullanımdan
önce PIP ve
PEEP
ayarlarını
önceden
belirleyin.**



Ventilasyon basınçlarının etkin şekilde izlenmesi için entegre, renk kodlu basınç manometresi.



PEEP düğmesi, klinisyenin PEEP değerini ayarlamasına olanak tanır; ventilasyon, istenen solunum hızında PEEP düğmesindeki deliğin aralıklı olarak kapatılmasıyla sağlanır ve böylece inspirasyon ve ekspirasyon gerçekleşir.



40 cm H₂O üzerindeki basınçlar gerektiğinde, inspiratuar basınç kontrol ünitesinde isteğe bağlı geçersiz kılma kapağını kullanın.

YAN YANA

Güncel NRP kılavuzları, yenidoğanlara manuel ventilasyon uygulamak için kendi kendine şişen, akışla şişen veya T-parçası resüsitatörlerinin kullanılmasını önermektedir. Bu karşılaştırmalı tablo, T-parçası resüsitatörünün BVM ve hiperşişirme sistemine kıyasla sunduğu ek özellikleri vurgulamaktadır.



YENİDOĞAN RESÜSİTATÖR Ü ÖZELLİKLER + İSLEVSSELLİK

| | SAFET™ | BVM | HYPERINFLATION |
|---|--------|-----|----------------|
| Sürekli O ₂ akışı | ● | | ● |
| Önceden ayarlanmış ve tutarlı PIP basıncı sağlayın | ● | | |
| Önceden ayarlanmış ve tutarlı PEEP sağlayın | ● | ● | ● |
| CPAP uygulaması yapılabilir | ● | | ● |
| Resüsitasyon sırasında önceden ayarlanabilir maksimum basınç ve ayarlanabilirlik özelliği | ● | | |
| Entegre Basınç Manometresi | ● | ● | ● |
| Basınç Tahliye Valfi | ● | ● | ● |
| Elle sıkıştırma gereklidir | | ● | ● |
| Portable | ● | ● | ● |

KONFIGÜRASYONLAR



SafeT™ – Pop-off override (aşırı basınç geçersiz kılma)

SAFET™ T-PARÇA RESÜSİTATÖR

| KOD | AÇIKLAMA | MASKE BOYUTU | PK |
|-------|------------------------------------|-----------------------|----|
| ST710 | SafeT T-Piece Resuscitator Pop Off | X-Small Neonate Maske | 10 |
| ST711 | SafeT T-Piece Resuscitator Pop Off | Small Neonate Maske | 10 |
| ST712 | SafeT T-Piece Resuscitator Pop Off | Small Infant Maske | 10 |
| ST713 | SafeT T-Piece Resuscitator Pop Off | Infant Maske | 10 |
| ST714 | SafeT T-Piece Resuscitator Pop Off | Neonate Round Maske | 10 |
| ST715 | SafeT T-Piece Resuscitator Pop Off | Infant Round Maske | 10 |
| ST717 | SafeT T-Piece Resuscitator Pop Off | Maskesiz | 10 |

